

# CICATRINE®

## Acide hyaluronique 5 mg



### FORME ET PRESENTATION

Ce dispositif médical se présente sous forme d'ovules gynécologiques: boîte de 10 ovules.

### COMPOSITION

Hyaluronate de sodium ..... 5mg  
Extraits lipidiques de : Calendula officinalis, Centella asiatica, Aloe vera et Camomille, Huile essentielle de Niaouli, Alpha-tocophérol (vitamine E).  
Glycérides hémi-synthétiques ..... q.s.p 1 ovule

### PROPRIETES

Les ovules gynécologiques CICATRINE 5mg exercent leur activité grâce à la présence d'acide hyaluronique, un mucopolysaccharide abondamment distribué dans de nombreux tissus corporels.

L'acide hyaluronique agit comme soutien structurel, ce qui procure tonicité, trophisme et élasticité aux tissus.

L'acide hyaluronique vise à accélérer et à améliorer le processus d'épithélisation et de réparation tissulaire.

Cicatrine est un soin gynécologique conçu pour favoriser la réparation, l'hydratation et la cicatrisation de la muqueuse vaginale.

### INDICATIONS

- Adjuvant des processus de réparation des états atrophiques et dystrophiques de la muqueuse vaginale.
- Favorise la cicatrisation : lors du post-partum, après chirurgie gynécologique, dans les dystrophies consécutives à la chimiothérapie et aux radiations ionisantes, dans les dystrophies dues à la sécheresse vaginale, notamment par carence oestrogénique.

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité connue à l'un des composants de ce produit.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI ET MISES EN GARDES SPECIALES

Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux.

Cicatrine est destiné aux femmes de plus de 15 ans sauf avis médical contraire.

Demander l'avis d'un professionnel de santé avant d'utiliser Cicatrine ovule pendant la grossesse, l'allaitement, les périodes de menstruation, en cas d'infection vaginale ou si les symptômes persistent.

Cicatrine peut être utilisé avec les préservatifs, il n'est pas un moyen de contraception et peut être associé à tout traitement hormonal.

### POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION



#### Posologie

Adjuvant de cicatrisation : 1 ovule par jour.

Hydratant en cas de sécheresse vaginale : 1 ovule 2 fois par semaine (cure de 5 semaines à renouveler si nécessaire).

#### Mode d'administration

- Se laver les mains avant et après chaque utilisation.
- Retirer l'ovule de son emballage en tirant les deux languettes précédécoupées.

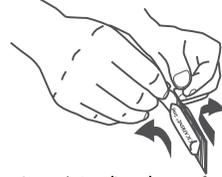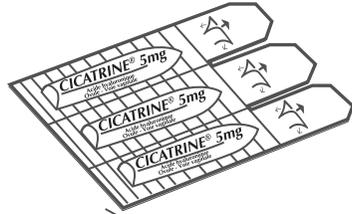

- Voie vaginale. Introduire l'ovule au fond du vagin en position allongée, de préférence le soir au coucher.
- La durée d'utilisation dépend de l'évolution des symptômes : le cas échéant, les ovules Cicatrine peuvent être utilisés pendant des périodes prolongées.

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

En raison de la présence de l'huile essentielle de Niaouli, Cicatrine ovule est contre indiqué durant les trois premiers mois de la grossesse.

A partir du quatrième mois de la grossesse, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin avant son utilisation.

Cicatrine ovule est contre indiqué pendant l'allaitement

### INTERACTIONS AVEC D'AUTRES PRODUITS

Les interactions avec d'autres produits ne sont pas connues ; il est donc conseillé de consulter un médecin avant d'utiliser CICATRINE 5mg ovule en association avec d'autres dispositifs médicaux ou médicaments à usage vaginal.

### EFFETS INDESIRABLES

L'utilisation de tout produit à usage local, particulièrement pendant une période prolongée, peut provoquer une sensibilité. Dans ce cas, il est conseillé d'interrompre le traitement et de consulter un médecin afin d'entamer un traitement approprié.

Si d'autres effets indésirables surviennent, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien

### CONDITIONS DE CONSERVATION

- Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.
- A conserver à une température ne dépassant pas 25°C dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et de la chaleur.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### DISPOSITIF MEDICAL

Classe : IIb

D.H.N° : ط م Classe IIb/154/18

Date de mise à jour de la notice : Mars 2022.



**LABORATOIRES SALEM**


Détenteur de DH, Fabricant, Conditionneur:  
LABORATOIRES SALEM - Z.I. 19600EL-EULMA - ALGERIE  
[www.labsalem.com](http://www.labsalem.com)

D.H.N° : ط م Classe IIb/154/18



# سيكاترين®

## حمض الهيالورونيك 5 مغ

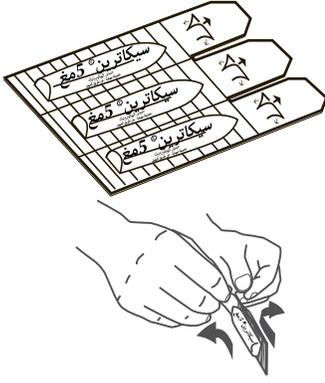

### شكل و تقديم

يقدم هذا الجهاز الطبي على شكل تحميلات مهبلية: علبة تحتوي على 10 تحميلات مهبلية.

### التركيب

هيالورونات الصوديوم..... 5مغ  
مستخلصات دهنية ل: الأذريون الطبي، عشبة النمر، الصبار والبابونج، الزيت العطري لللبقاء خماسية العروق، ألفاتوكفيرول (فيتامين هاء)، غليسيريدي نصف تركيبي..... ك.ك.ل 1 تحميلة مهبلية

### الخصائص

التحميلات المهبلية سيكاترين 5 مغ تعمل بفضل وجود حمض الهيالورونيك متعدد السكريد المخاطي الموزع بكثرة في العديد من أنسجة الجسم. يعمل حمض الهيالورونيك كداعم هيكلية، فيوفر مرونة و قابلية شد و انقباض للأنسجة. يهدف حمض الهيالورونيك إلى تسريع وتحسين عملية تشكل النسج الظاهري وإصلاح الأنسجة. سيكاترين علاج خاص للنساء مصمم لتعزيز إصلاح وترطيب و التئام جروح الغشاء المخاطي المهبلية.

### وواعي الاستعمال

- يساعد على إصلاح حالات الضمور الجزئي أو الكلي للغشاء المخاطي المهبلية.  
- يعزز التئام الجروح: خلال فترة ما بعد الولادة، بعد الجراحة النسائية، في الضمور الناتج عن العلاج الكيميائي والإشعاع المؤيون، في الضمور بسبب جفاف المهبل، بما في ذلك نقص هرمون الأستروجين.

### موانع الاستعمال

فرط الحساسية لأحد مكونات هذا المنتج.

### احتياطات الاستعمال وتحذيرات خاصة

لا يبلع. تجنب ملابس العيّن.  
سيكاترين مخصص للنساء فوق 15 سنة ما لم ينصح طبيباً بخلاف ذلك.

طلب نصيحة أخصائي الرعاية الصحية قبل استخدام التحميلات المهبلية سيكاترين أثناء الحمل، الارضاع، فترات الحيض، في حالة الإصابة بالعدوى المهبلية أو إذا استمرت الأعراض.

يمكن استخدام سيكاترين مع الواقي الذكري، فهو ليس وسيلة لمنع الحمل ويمكن استخدامه مع أي علاج هرموني.

### الجرعة و طريقة الاستعمال

#### الجرعة

مساعد لانتئام الجروح: 1 تحميلة مهبلية في اليوم.  
مرطب في حالة جفاف المهبل: 1 تحميلة مهبلية مرتين في الأسبوع (مدة العلاج 5 أسابيع، تجدد إذا لزم الأمر).

#### طريقة الاستعمال

- غسل اليدين قبل و بعد كل استخدام.  
- اخراج التحميلة المهبلية من غلافها بعد سحب المقاطع المحددة.

- عن طريق المهبل، يجب إدخال التحميلة المهبلية في عمق المهبل في وضعية استلقاء، من المستحسن في المساء قبل النوم.  
- مدة الاستخدام تعتمد على تطور الأعراض: إن وجدت، يمكن استخدام التحميلات المهبلية سيكاترين لفترات طويلة.

### الحمل و الارضاع

نظراً لوجود الزيت العطري لللبقاء خماسية العروق، يمنع استعمال التحميلات المهبلية سيكاترين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.  
ابتداء من الشهر الرابع من الحمل يجب استشارة طبيبك قبل استعمالها.  
يمنع استخدام التحميلات المهبلية سيكاترين أثناء الرضاعة الطبيعية.

### تداخلات مع مركبات أخرى

التفاعل مع مركبات أخرى غير معروف؛ من المستحسن استشارة الطبيب قبل استخدام التحميلات المهبلية سيكاترين 5 مغ مع غيرها من الأجهزة الطبية أو الأدوية ذات الاستخدام المهبلية.

### الأعراض الجانبية

- الاستخدام الموضعي لأي منتج و خاصة لفترات طويلة قد يسبب حساسية. في هذه الحالة ينصح بالتوقف عن استخدامه واستشارة الطبيب لبدء العلاج المناسب.  
- في حالة ظهور أعراض جانبية أخرى يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي.

### شروط الحفظ

- لا يجب تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العلبة الخارجية.  
- يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية في علته الأصلية بعيداً عن الضوء و الحرارة.  
- يحفظ بعيداً عن متناول و عن نظر الأطفال.

### جهاز طبي

#### الصف: IIb

رقم مقرر المطابقة: Classe IIb/154/18 م ط  
تاريخ تحديث النشرة: مارس 2022.



حامل مقرر المطابقة، مصنع، معبىة :  
مخابر سالم م.ص. 19600 العلة - الجزائر  
www.labosalem.com

مخابر  
سالم